

# User manual

MANUEL D'UTILISATION  
GEBRUIKSAANWIJZING  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K OBSLUZE

## Mia





## Vyvýšené toaletní sedadlo Mia

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti Vermeiren. Tento návod slouží k tomu, aby vám pomáhal s použitím tohoto produktu. Řádně si jej přečtěte. Máte-li po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, obraťte se bez obav na svého odborného prodejce. Nejnovější verzi informací z tohoto návodu vždy naleznete na našich webových stránkách <http://www.vermeiren.com/>. Tyto webové stránky pravidelně navštěvujte pro případné aktualizace. Osoby se zrakovým postižením si mohou stáhnout elektronickou verzi tohoto návodu, kterou jim může přečíst softwarová aplikace text-to-speech.

### 1 Při dodávce

Vybalte Váš produkt a ověřte, zda je dodávka kompletní. Balení obsahuje následující položky:

- 1 vyvýšené toaletní sedadlo s potahem
- 2 nastavovače šířky
- Volitelné: polštář na toaletní sedadlo
- Návod k obsluze

Ověřte, že výrobek není poškozen přepravou. Zjistíte-li při dodávce jakékoli škody, obraťte se na dopravce.

### 2 Montáž a použití toaletního sedadla


**POZOR**
**Nebezpečí zranění**

- Před každým použitím se ujistěte, že je toaletní sedadlo bezpečně připevněno k toaletě.
- Pro zajištění správné montáže toaletního sedadla jednou týdně povolte a znovu utáhněte nastavovače šířky.
- Nepřekračujte maximální hmotnost uživatele.


Indikace a kontraindikace: Toaletní sedadlo je navrženo tak, aby zvedlo výšku toalety na pohodlnou úroveň, což usnadňuje usednutí a vstávání, například v případě: dysfunkce dolních končetin z důvodu omezené nebo žádné pohyblivosti kloubů, snížené svalové síly dolních končetin, poškození bederní páteře, poškození nervového systému,... Cílem tohoto výrobku je umožnit samostatné nebo samostatnější používání toalety. Při odpovídajícím použití nejsou známy žádné kontraindikace.

Mia je k dispozici ve 2 možných výškách sedadel: 10 cm nebo 15 cm.

Maximální uživatelská hmotnost vyvýšeného toaletního sedadla je 225 kg.

Instalace Mia:

1. Zvedněte záchodové víko a prkýnko. Je nutné odstranit víko a prkýnko.
2. Zasuňte nastavovače šířky (1) do místa na vyvýšeném toaletním sedadle. Otáčejte hvězdicový knoflík ve směru hodinových ručiček pro zmenšení šířky.
3. Umístěte vyvýšené sedadlo na toaletní ráfek [A] přední hranou (2) na vnější straně.
4. Zvýšené toaletní sedadlo posuňte co nejvíce dozadu [B].
5. Ručně utáhněte nastavovače šířky (1).

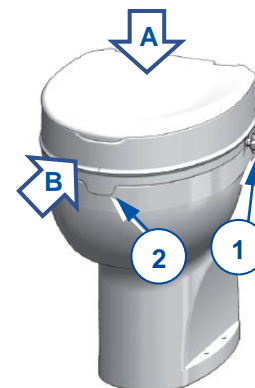

Chcete-li umístit volitelný polštář, sejměte zvýšený kryt sedadla.

Pomalou se usadte na vyvýšené toaletní sedadlo s ohnutím loktů, kyčlí a kolen, pokud je to možné. Při usazování / vstávání se neopírejte o vyvýšené toaletní sedadlo.

### 3 Údržba

Váše toaletní křeslo je vyrobeno z plastových součástí. Mia lze čistit a dezinfikovat běžnými výrobky pro domácnost. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které mohou způsobit změnu barvy.

#### 3.1 Životnost výrobku

Vyvýšené toaletní sedadlo je navrženo tak, aby mělo průměrnou životnost 5 let.

### 4 Technické parametry

Výrobce	Vermeiren
Typ	Vyvýšené toaletní sedadlo
Model	Mia

Popis	Rozměry
Maximální zatížení	225 kg
Přidaná výška sedadla	65 mm
Šířka	365 mm
Délka	405 mm
Skladovací teplota	+5°C - +41°C

Vyhrazujeme si právo na zavádění technických změn. Tolerance měření +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.



Vermeiren GROUP  
Vermeirenplein 1 / 15  
2920 Kalmthout  
BE

website: [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

### **Pokyny pro specializovaného prodejce**

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu.

Verze: B, 2022-07

Basic UDI: 5415174 120903Mia GW

**Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.**